

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок збору матеріалу для проведення дослідження «Рідинна цитологія ПАП-тест CellPrep»

Збір матеріалу для проведення дослідження «Рідинна цитологія ПАП-тест CellPrep» здійснюється за допомогою спеціального набору. Даний набір складається з віали (контейнер з маркуванням «LBC solution CellPrep plus Cervical» зі спеціальним розчином) та щітки для збору матеріалу. Використання такого набору дозволяє здійснити збір матеріалу у достатній кількості для проведення ПАП-тесту.


Увага!

1. Матеріал, взятий в інші рідини чи контейнери для рідинної цитології Biotyne CellPrep, є непридатним.

2. Заборонено використовувати віалу Biotyne CellPrep Cervical (синя етикетка) для біопсій (рідина не містить формалін!).


Алгоритм

збору матеріалу на дослідження «Рідинна цитологія PAP-тест CellPrep»

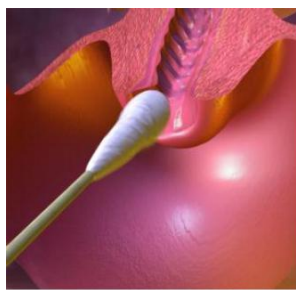

Підготовка

При наявності надлишкової кількості слизу, видалити її ватним тампоном.

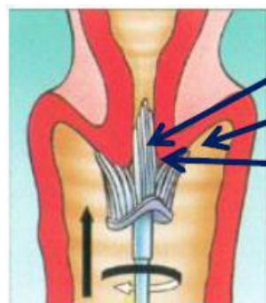

Ендоцервікс

Вагінальна порція

Ектоцервікс

Крок 1

Спеціальною щіточкою «Cervex» взяти матеріал з поверхні шийки матки, повернувши щіточку на 360 градусів 3-4 рази



Крок 2


Відкрити віалу (контейнер, маркований LBC solution CellPrep plus Cervical) і занурити щіточку в консервуючий розчин



Крок 3

Добре виполоскати щіточку в розчині (!).

Ознакою якісного взяття є каламутність розчину (клітини знаходяться в розчині, а не на щіточці)

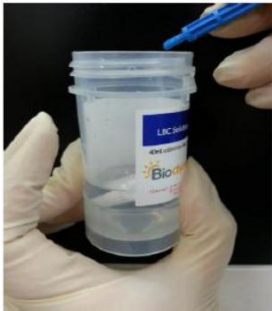

Крок 4

Від`єднати щіточку від ручки і залишити її у контейнері



Крок 5

Закрити контейнер і підписати його (на етикетці вказати прізвище та ініціали пацієнтки, вік, заклад охорони здоров'я, який направляє матеріал)

Звертаємо увагу, що віала може бути використана до дати вказаної на етикетці.

Віала із зібраним матеріалом може зберігатися при кімнатній температурі до 4 тижнів. У зазначені терміни матеріал є придатним для проведення досліджень та дозамовлення інших додаткових послуг.