


# ИНСТРУКЦИЯ

## о порядке забора материала для проведения исследования «Digene® HC2 High-Risk HPV DNA» (Digene HC2 ДНК ВПЧ-тест)

Забор материала для проведения исследования **Digene HC2 ДНК ВПЧ тест (Digene®-тест)** осуществляется с помощью специального набора «Digene HC2 DNA» (производитель компания «QIAGEN»). Данный набор содержит специальный инструмент для отбора образца, на котором будет проводиться исследование. Использование набора «Digene HC2 DNA» для отбора образца позволяет осуществить забор материала в достаточном количестве для проведения Digene®-теста, после одновременного взятия отдельной кисточкой мазка для ПАП-теста. Это позволяет лаборатории проводить Digene®-тест и ПАП-тест параллельно в режиме котестирования.


### Алгоритм

#### забора образца с помощью набора «Digene HC2 DNA»

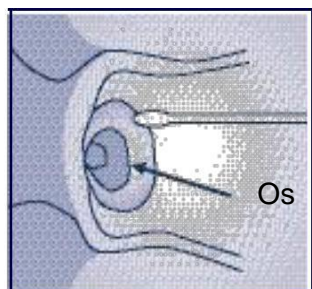

#### Подготовка

Удалить ватным тампоном остатки слизи с шейки матки.

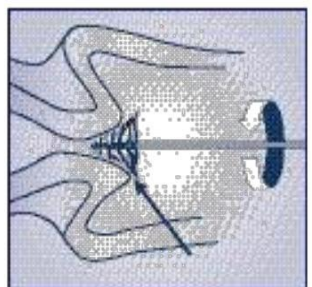

#### Шаг 1


Ввести щеточку в цервикальный канал на глубину 1-1,5 см, или пока длинные внешние ворсины щеточки не коснутся поверхности эктоцервикса, не вводя щеточку в цервикальный канал полностью. После чего три раза провернуть щеточку на 360° против часовой стрелки. Достать щеточку, не допуская возможности контакта ворсинок со стенками влагалища, наружными стенками пробирки или другими объектами.

Цервикальный канал



#### Шаг 2

Опустите конец щеточки на дно пробирки. Сломайте щеточку на уровне отметки, оставив конец щеточки в транспортной среде.

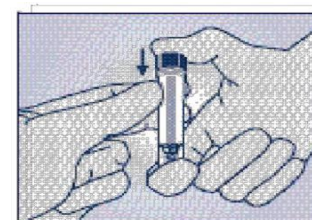

#### Шаг 3

Пробирка с образцом может храниться до проведения исследования в течение 2-х недель при комнатной температуре.