

ИНСТРУКЦИЯ о порядке забора материала для проведения исследования «Жидкостная цитология ПАП-тест CellPrep»

Забор материала для проведения исследования «Жидкостная цитология ПАП-тест CellPrep» осуществляется с помощью специального набора. Данный набор состоит из виалы (контейнер с маркировкой «LBC solution CellPrep plus Cervical» со специальным раствором) и щеточки для забора материала. Использование такого набора позволяет осуществить забор материала в достаточном количестве для проведения ПАП-теста.


Внимание!

1. Материал, взятый в другие жидкости или контейнеры для жидкостной цитологии Biotyne CellPrep, является непригодным.

2. Запрещено использовать виалу Biotyne CellPrep Cervical (синяя этикетка) для биопсий (жидкость не содержит формалин!).


Алгоритм

забора материала для исследования «Жидкостная цитология PAP-тест CellPrep»

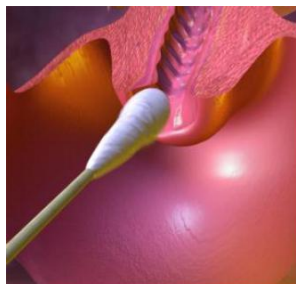

Подготовка

При наличии избыточного количества слизи, удалить ее ватным тампоном.

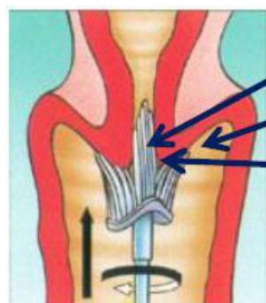

Эндоцервикс

Вагинальная порция

Эктоцервикс

Шаг 1

Специальной щеточкой «Cervex» взять материал с поверхности шейки матки, провернув щеточку на 360 градусов 3-4 раза



Шаг 2

Открыть виалу (контейнер, маркированный LBC solution CellPrep plus Cervical) и погрузить щеточку в консервирующий раствор



Шаг 3

Хорошо промыть щеточку в растворе (!).

Признаком качественного взятия является мутность раствора (клетки находятся в растворе, а не на щеточке)



Шаг 4

Отсоединить щеточку от ручки и оставить ее в контейнере



Шаг 5

Закрывать контейнер и подписать его (на этикетке указать фамилию и инициалы пациентки, возраст, лечебное учреждение, которое направляет материал)

Обращаем внимание, что виала может быть использована до даты, указанной на этикетке.

Виала с собранным материалом может храниться при комнатной температуре до 4 недель. В указанные сроки материал является пригодным для проведения исследований и доказа других дополнительных услуг.